

Silla de ruedas neurológica

pediátrica plegable

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2019DM-0020274

Especificaciones

FS958



Asiento y espaldar removibles.



Estructura en aluminio.

Controladores laterales de tronco.

Apoyabrazos removibles y graduables.

Fabricada en aluminio de alta calidad, ofrece la combinación perfecta de resistencia y ligereza. Tiene apoyabrazos y apoyapiés que son removibles y graduables para una postura más personalizada. Cuenta con un sistema de reclinación y de basculación que en conjunto con sus múltiples ajustes permiten adaptarla a las necesidades cambiantes de cada niño. Al ser plegable la hace muy fácil de guardar y transportar.

Este producto se encuentra sujeto a inventario.

Soporte para pantorrilla graduable, removible y elevable.

Apoyapiés elevables, removibles y ajustables.

Rueda trasera en poliuretano, rin estrella 15".

Rueda delantera maciza 6".

+ Otras especificaciones

 Ruedas antivuelco

 Mesa de trabajo

 Sistema reclinable

 Arnés de seguridad

 Soporte pélvico

 Sistema de basculación

 Abductor de cadera

 Soporte céfalico



Imagen del producto



Medidas

Capacidad de peso
 **75kg**

Peso del producto
 **22kg**

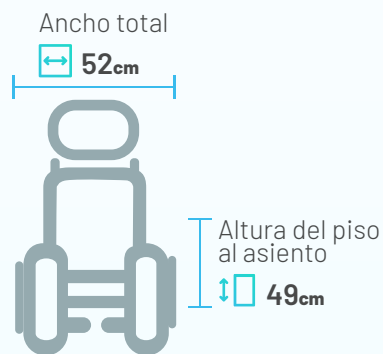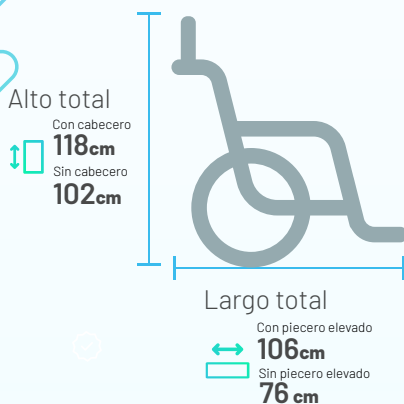

Medidas del asiento

	Profundidad 41cm
	Ancho 38cm
	Altura espalda 53cm

Recomendaciones

- Ajustar los apoyapiés a una altura adecuada para la comodidad del usuario.
- Revisar que los frenos estén funcionando correctamente antes de cada uso.
- Accionar los frenos antes de sentar al paciente y siempre que la silla de ruedas esté bloqueada para evitar movimientos involuntarios.
- Evitar terrenos irregulares y superficies resbaladizas que puedan comprometer la estabilidad de la silla de ruedas.
- Almacenar la silla de ruedas en un lugar seco y protegido de la humedad para evitar la corrosión.
- No exceder la capacidad máxima de carga de la silla, ni sobrecargar la silla de ruedas con objetos adicionales, ya que puede afectar la seguridad del usuario.

Garantía

Este producto está cubierto con una garantía de 1 año contra defectos de fabricación en la estructura no cubre rodamientos, partes plásticas ni tapicería.

Para hacer válida la garantía, no retire los stickers de serial y registro sanitario y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.



Escanea este código
para reproducir el video
de esta referencia.

www.tmecol.com |    