

Silla de ruedas neurológica

para adulto plegable

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2019DM-0020274

Especificaciones



Asiento y espaldar removibles.



Estructura en aluminio.



Controladores laterales de tronco.



Apoyabrazos removibles y ajustables en altura.



Soporte para pantorrilla graduable y elevable.



Rueda trasera en poliuretano, rin estrella 16".



Rueda delantera maciza 6".



Apoyapiés graduables y elevables.

Imagen ilustrativa

FS958LBCGPY

Fabricada en aluminio de alta calidad, ofrece la combinación perfecta entre resistencia y ligereza.

Tiene apoyabrazos y apoyapiés que son removibles y graduables para una postura más personalizada.

Cuenta con un sistema de reclinación y de basculación que en conjunto con sus múltiples ajustes permiten adaptarla a las necesidades cambiantes de cada persona.

Al ser plegable la hace muy fácil de guardar y transportar.

Este producto se encuentra sujeto a inventario.

Especificaciones



Ruedas antivuelco



Arnés de seguridad



Abductor de cadera



Mesa de trabajo



Soporte pélvico



Soporte céfalico



Sistema reclinable



Sistema de basculación

Imagen del producto




Medidas

Capacidad de peso
100kg

Peso del producto
13.8kg

Alto total
Con cabecero
110cm
Sin cabecero
97cm

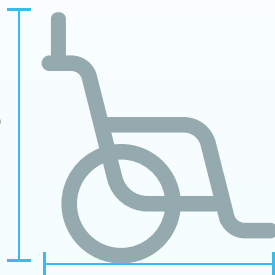

Largo total

Con piecero elevado
133cm
Sin piecero elevado
124cm

Ancho total

60cm



Altura del piso
al asiento
43cm

Medidas del asiento

Profundidad
41cm

Ancho
46cm

Altura espalda
54cm


Recomendaciones

- Ajustar los apoyapiés a una altura adecuada para la comodidad del usuario.
- Revisar que los frenos estén funcionando correctamente antes de cada uso.
- Accionar los frenos antes de sentar al paciente y siempre que la silla de ruedas esté bloqueada para evitar movimientos involuntarios.
- Evitar terrenos irregulares y superficies resbaladizas que puedan comprometer la estabilidad de la silla de ruedas.
- Almacenar la silla de ruedas en un lugar seco y protegido de la humedad para evitar la corrosión.
- No exceder la capacidad máxima de carga de la silla, ni sobrecargar la silla de ruedas con objetos adicionales, ya que puede afectar la seguridad del usuario.

Garantía

Este producto está cubierto con una garantía de 1 año contra defectos de fabricación en la estructura no cubre rodamientos, partes plásticas ni tapicería.

Para hacer válida la garantía, no retire los stickers de serial y registro sanitario y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

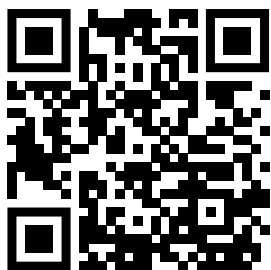

Escanea este código
para obtener más
información.

www.tmecol.com |    