

Silla de ruedas motorizada

plegable

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2019DM-0020274

📄 Especificaciones



Estructura en acero.



Cojinería en nylon con malla acolchada.



Apoyabrazos abatibles.



Apoyapiés removibles.



🌀 Rueda trasera neumática 16".

🌀 Rueda delantera maciza 8".



Pin de bloqueo en ruedas traseras
(para uso manual o automático)

FS111-AF1

Diseñada para proporcionar una movilidad independiente y cómoda a los usuarios. Está fabricada en acero resistente que garantiza durabilidad para un uso prolongado. Gracias a sus ruedas traseras neumáticas de 16 pulgadas y delanteras macizas de 8 pulgadas brindando un desplazamiento suave y estable tanto en interiores como en exteriores. Cuenta con un joystick que permite manejar la silla con precisión y sin esfuerzo. Sus cajones de baterías, en la parte inferior de los apoyabrazos, permite plegarla sin necesidad de retirar la batería, lo que facilita el almacenamiento de la misma.

Este producto se encuentra sujeto a inventario.

+ Incluye



Joystick



Cinturón de seguridad

📄 Otras especificaciones



Velocidad 1 a 6km/hr



Potencia del motor
250Wx2



Inclinación máxima
12°



Capacidad de la batería
24Ah



Autonomía: max 20km/8h

*Dependiendo del peso, velocidad, terreno e inclinación.

Imagen del producto



Medidas

Capacidad de peso

 100kg

Peso del producto con baterías

 47.5kg

Alto total
 95cm



Largo total
 105cm

Ancho total

 60cm



Altura del piso
al asiento

 50cm

Medidas del asiento

 Profundidad
40cm

 Ancho
47cm

 Altura espalda
45cm

Recomendaciones

- Verificar que los neumáticos se encuentren bien inflados.
- Subir y bajar de la silla mientras está apagada.
- No levantar la silla por los brazos. Al ser removibles, podrían dañarse.
- Ajustar los apoyapiés a una altura adecuada para la comodidad del usuario.
- Revisar que los frenos estén funcionando correctamente antes de cada uso.
- Accionar los frenos antes de sentar al paciente y siempre que la silla de ruedas esté bloqueada para evitar movimientos involuntarios.
- Evitar terrenos irregulares y superficies resbaladizas que puedan comprometer la estabilidad de la silla de ruedas.
- Almacenar la silla de ruedas en un lugar seco y protegido de la humedad para evitar la corrosión.

- No exceder la capacidad máxima de carga de la silla, ni sobrecargue la silla de ruedas con objetos adicionales, ya que puede afectar la seguridad del usuario.
- No permita que la batería se descargue por completo, esto afectará su vida útil.
- Tenga siempre presente realizar las cargas de la batería al 100%, las cargas parciales afectarán su rendimiento óptimo.

Garantía

Este producto está cubierto con una garantía de 1 año contra defectos de fabricación en la estructura no cubre rodamientos, partes plásticas ni tapicería, más 6 meses en controlador y baterías, no cubre descargas.

Para hacer válida la garantía, no retire los stickers de serial y registro sanitario y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.



Escanea este código
para obtener más
información.

www.tmecol.com |    