

Cama hospitalaria eléctrica

4 Movimientos con barandas en aluminio

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2021DM - 0023963



Especificaciones



Tendido de 4 planos
en lámina ranurada.



2 barandas de seguridad
abatibles en aluminio.

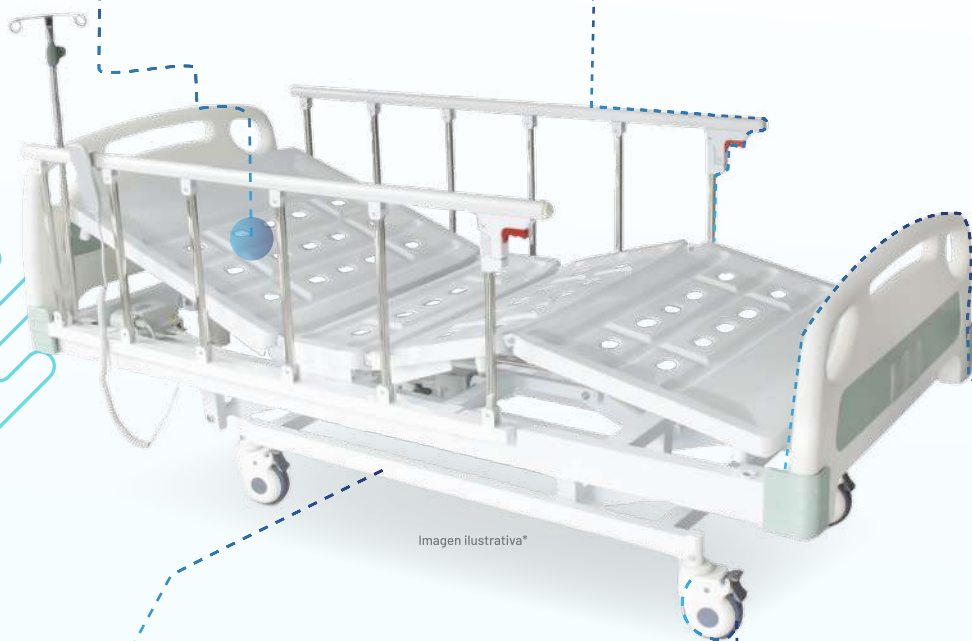


Imagen ilustrativa*



Estructura de acero
con acabado en pintura
electrostática.



Tableros de cabecero
y pieceros fabricados en
plástico ABS.



4 Ruedas de 5"
con freno individual.

YKB001 (311)

Diseñada para brindar una atención integral al paciente, esta cama cuenta con un sistema de accionamiento eléctrico que permite ajustar la posición del espaldar, pieceros, altura y posición semi-fowler de forma fácil y precisa. Su estructura robusta en acero y su tendido de láminas ranuradas de alta resistencia garantizan durabilidad y fácil limpieza. Posee barandas de aluminio abatibles que brindan seguridad al paciente sin limitar el acceso del cuidador.

Este producto se encuentra sujeto a inventario.

Movimientos del producto



0 - 80° (+/-5)

Elevación
de espaldar



0 - 40°

Elevación
de pieceros




45- 70cm

Graduación
de altura



Semi-fowler

Detalles del producto

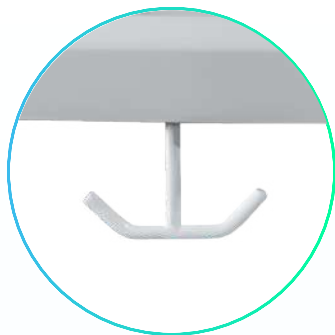

Gancho bolsa de drenaje



Control del paciente



Porta sueros



Medidas sin colchón

Capacidad de peso

 **240kg**

Externas



Alto baranda
↑ **38cm**




Largo total
↔ **208cm**

Ancho total
↔ **98cm**

Del tendido



Alto de tendido
a piso
↑ Máx **70cm** ↑ Min **45cm**

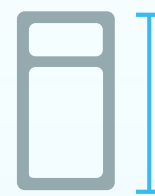

Largo total
↔ **193cm**

Ancho total
↔ **83cm**

***Medida sugerida de colchón: 1,90 x 90**

"Todas nuestras medidas tienen un intervalo de +-2cm de diferencia."

Recomendaciones


- Accione los frenos de las ruedas, siempre que vaya a dejar la cama en un sitio fijo para evitar accidentes.
- Para subir o bajar al paciente, sitúe la cama en la altura mínima o en la que el paciente pueda tocar el piso.
- No permita que el control sea accionado por personas inexpertas o en modo de juego.

- Verifique regularmente que las barandas estén ajustadas.
- Realice un aseo general a la cama de manera periódica con un paño húmedo, posteriormente séquela, no utilice productos fuertes que puedan afectar la pintura.
- Ubique la cama en un lugar seco y protegido de la humedad para evitar corrosión.
- Nunca exceda la capacidad máxima de carga de la cama.
- Puede lubricar los tornillos móviles con regularidad, si desea acompañamiento de nuestro personal, contáctenos.

Garantía

Este producto está cubierto por una garantía de 1 año contra defectos de fabricación en la estructura, no cubre partes plásticas.

Para hacer válida la garantía, no retire los stickers de serial y registro sanitario y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

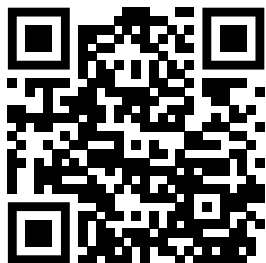

Escanea este código
para obtener más
información.