

Cama hospitalaria manual

3 movimientos con barandas en aluminio

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2021DM - 0023963



Especificaciones




Tendido de 4 planos
en lámina ranurada.



2 barandas de seguridad
abatibles en aluminio.

Imagen ilustrativa*

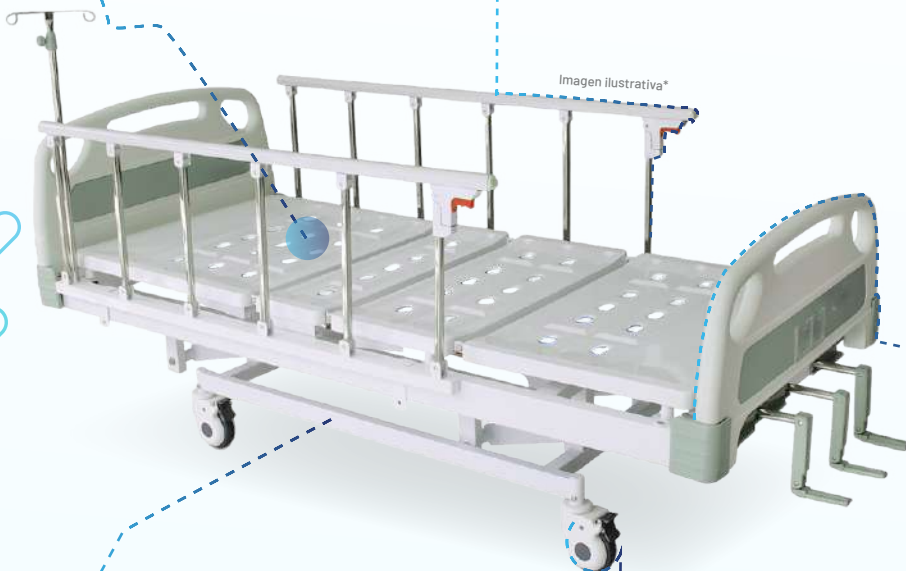

Estructura de acero
con acabado en pintura
electrostática.



4 Ruedas de 5"
con freno individual



**Tableros de cabecero
y pieceros** fabricados en
plástico ABS.

YKB002 (319)

Diseñada para brindar una atención integral al paciente, esta cama ofrece tres movimientos: elevación de espalda, pieceros y graduación de altura, lo que permite al cuidador acceder con mayor facilidad al paciente.

Su estructura robusta en acero y su tendido de láminas ranuradas de alta resistencia garantizan durabilidad y fácil limpieza. Posee barandas de aluminio abatibles que brindan seguridad al paciente.

Este producto se encuentra sujeto a inventario.

Movimientos del producto



0 - 80° (+5)

**Elevación
de espalda**



0 - 40°

**Elevación
de pieceros**



45- 70cm

**Graduación
de altura**

Detalles del producto



Gancho bolsa de drenaje



Manivelas retráctiles



Porta sueros



Pin para abatir las barandas



Medidas sin colchón


Capacidad de peso

 **240kg**

Externas



Del tendido

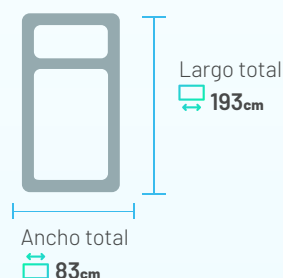

***Medida sugerida de colchón: 1,90 x 90**

"Todas nuestras medidas tienen un intervalo de +-2cm de diferencia."

Recomendaciones

- Accione los frenos de las ruedas, siempre que vaya a dejar la cama en un sitio fijo para evitar accidentes.
- Para subir o bajar al paciente, sitúe la cama en la altura mínima o en la que el paciente pueda tocar el piso.
- No permita que las manivelas sean accionadas por personas inexpertas o en modo de juego.

- Verifique regularmente que las barandas estén ajustadas.
- Realice un aseo general a la cama de manera periódica con un paño húmedo, posteriormente séquela, no utilice productos fuertes que puedan afectar la pintura.
- Ubique la cama en un lugar seco y protegido de la humedad para evitar corrosión.
- Nunca exceda la capacidad máxima de carga de la cama.
- Puede lubricar los tornillos móviles con regularidad, si desea acompañamiento de nuestro personal, contáctenos.

Garantía

Este producto está cubierto por una garantía de 1 año contra defectos de fabricación en la estructura, no cubre partes plásticas.

Para hacer válida la garantía, no retire los stickers de serial y registro sanitario y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.



Escanea este código
para reproducir el video
de esta referencia.