

Elite Back PB

Descripción del dispositivo médico

Espaldar rígido en aluminio, contorneado bajo (3 pulgadas) desmontable, en espuma con funda en material transpirable, con hardware que permita el ajuste de altura, profundidad, ángulo y rotación del espaldar. Apoyos laterales abatibles regulables en altura y profundidad.

Características



Espuma de alta resiliencia, moldeada.



Carcasa de respaldo contorneada, en ABS con fijación para apoyacabezas.



Cubierta exterior resistente al agua y transpirable.



Sistema de fijación "Easy Set" estándar y doble.



Fijación del apoyacabezas.



Soportes laterales de tronco, abatibles.




Fijación doble




Kit de montaje del espaldar.

Medidas

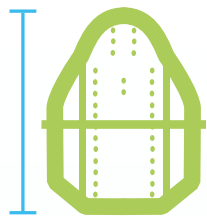

Altura

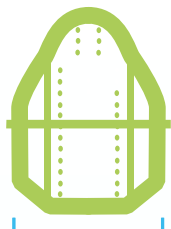

Ancho



Ajuste de profundidad



Ángulo de ajuste

Tallas disponibles

Model #	Altura total	Ancho total	Ajuste de profundidad	Ángulo de ajuste	Capacidad de peso	Peso del producto
MPB (Standard)	12", 16", 20"	14", 16", 17"	4"	40° rango	136 kg	1 kg
HDB (Heavy- Duty)	16", 20"	20", 22", 24"	4"	40° rango	227 kg	2 kg
HDBxW16 (Extra Wide)	16", 20"	21", 23", 25", -30"	4"	40° rango	227 kg	2 kg
HDBxW20 (Extra Wide)	16", 20"	25", -30"	4"	40° rango	227 kg	3 kg

Nota: El ancho, la profundidad, la altura capacidad y peso del producto se determina dependiendo de la medida requerida.

Indicación para formular este espaldar: Pacientes con parálisis cerebral, esclerosis múltiple, lesión medular, ELA u otras condiciones que afecten el control postural.

Pacientes que pasan largos periodos en silla de ruedas y necesitan mayor comodidad y estabilidad.

Recomendaciones

- No exceder la capacidad de peso del espaldar.
- Al instalar asegurarse de ajustar correctamente el espaldar según la postura y necesidades del paciente.
- Limpiar la cubierta exterior en lavadora (máx 60°).
- Verificar periódicamente los ajustes para garantizar un soporte óptimo y la máxima durabilidad.

Garantía

El producto cuenta con una garantía de 1 año contra defectos de fábrica.

¡Importante! No retire los stickers de registro sanitario ni los seriales, ya que son necesarios para validar la garantía.

Observaciones:

- * Las especificaciones reales del producto difieren de los datos de la tabla en ± 1 cm $\pm 0,5$ kg.
- * Las especificaciones reales del producto pueden variar según las diferentes configuraciones.
- * MATRX se reserva el derecho de modificar la información aquí incluida sin previo aviso.

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2024DM-0029508

www.tmecol.com |